

Processing Fluid (PF) fra testikler og haler

Vejledning til udtagning, opbevaring og forsendelse af PF-prøver til PCR for PRRS

Version 1.0 – 2023

PRRS
TAG HANDLING



Ved kastration og halekupering opsamles testikler og haler i en plasticpose

Maksimalt testikler og haler fra 20 kuld i en pose



Max
20 kuld



Grader
-20°

Det er vigtigt at lægge posen på frost så hurtigt som muligt efter udtagelsen

* Pose med testikler og haler kan sendes frosne til L&F Veterinært laboratorium

Husk at posen skal tømme op i køleskab

Klip et lille hul i posen

PF-prøven opsamles i en beholder med skruelåg

Sørg for, at der minimum er 2 ml PF-prøve i røret

PF-prøven skal på køl (4-8 grader)



Min
2 ml



Grader
4-8°



Grader
4-8°

PF-prøven tages direkte fra køleskab

Emballeres godt sammen med køleelementer

Husk at skrive PF-prøve på indsendelsesblanketten

*L&F Veterinært laboratorium, Kjellerup kan modtage frosne testikler/haler til aftapning af væske. SSI modtager ikke hele testikler/haler, men kun den aftappede væske (processing fluid).