



Tungeprøver (TTF tunge fluid)

Vejledning til udtagning, opbevaring og forsendelse af tungeprøver/TTF til PCR for PRRS

Version 1.0 – 2024



Tungevæv udtages fra døde grise

- Dødfødte grise
- Døde pattegrise
- Døde smågrise



Hold fast i tungen med en tang eller en pincet med modhager

Skær eller klip, så du får et stykke på ca 2 cm

Saml mindst 20 tungestykker til en analyse


Tørre tunger kan ikke undersøges



Læg tungestykkerne i en frysepose, luk posen med en stram knude og læg den på frost

Hvis prøven skal analyseres på SSI skal posen med tungestykker tøs op i køleskab.

Mindst 1 ml TTF-væske opsamles i en beholder med skruelåg og sendes til analyse vedlagt køleelement

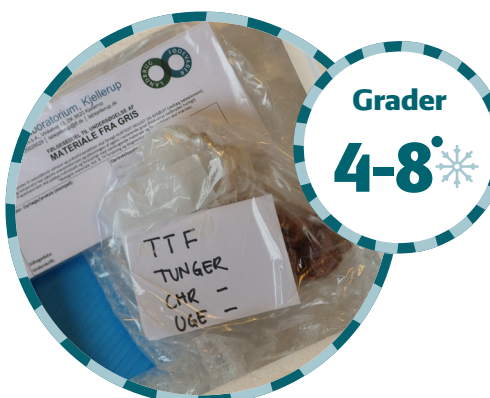

De frosne tungestykker lægges i en ekstra pose, der lukkes med en stram knude.

Husk at skrive TTF-prøve på indsendelsesblanketten, og skriv hvilken gruppe grise, der er prøver af